


Deze gebruiksaanwijzing is een verkorte versie van de volledige handleiding welke te vinden is op [validoss.nl/Sampling-Kit-IFU/](http://validoss.nl/Sampling-Kit-IFU/)

Dit blad dient enkel als geheugensteun.

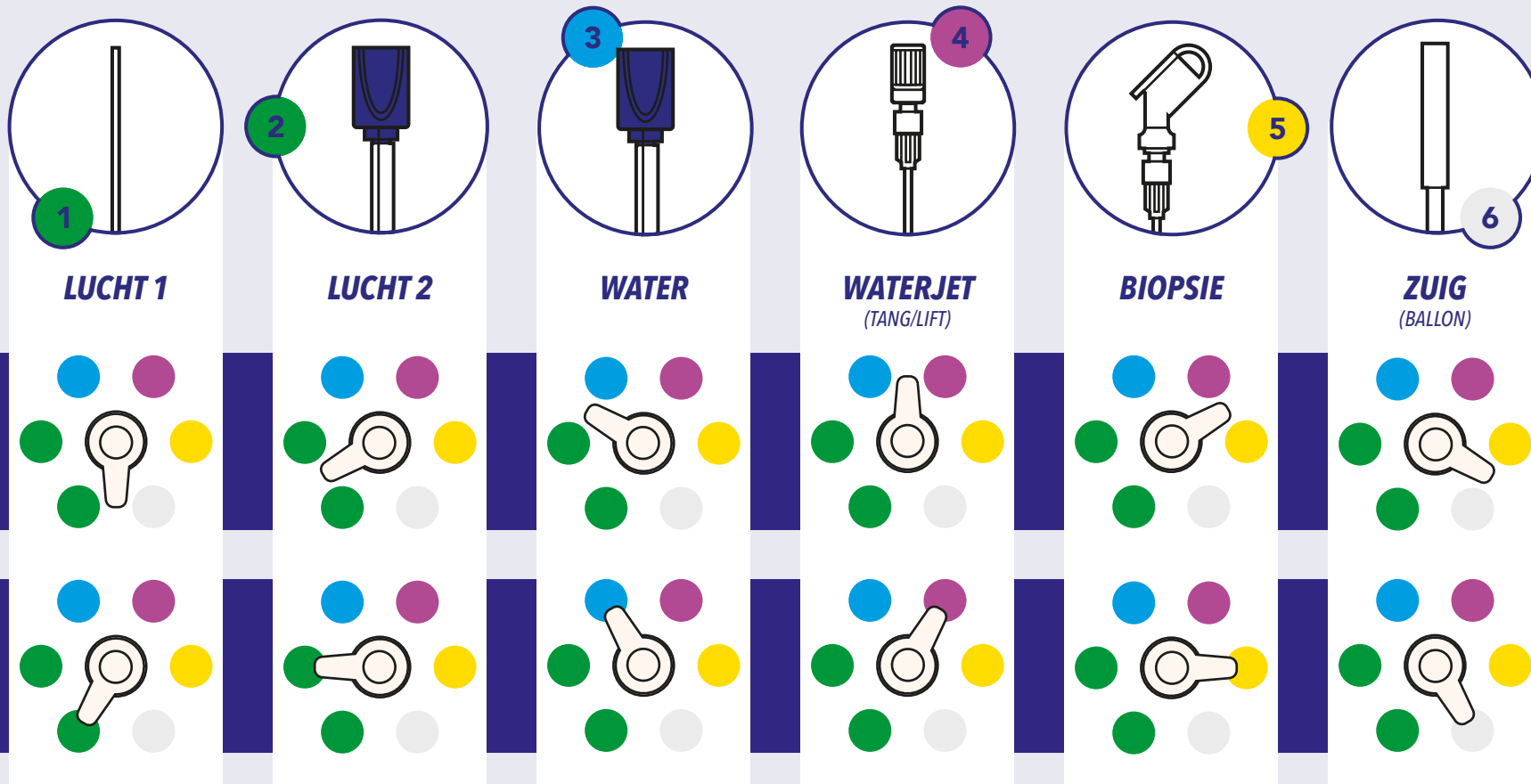

### SPUIT VULLEN met spoelvloeistof


### NAAR KANAAL en opvangen aan distaal

### AANDACHT

- Zorg ervoor dat tussen iedere kweekafname overtollig spoelvloeistof van de tip van de endoscoop licht afgeklopt wordt.
- Houdt telkens de kweekpotjes onder de tip van de endoscoop. Let op dat hierbij de tip het kweekpotje niet aan de binnenkant aanraakt.
- Zet niet te veel druk op de kanalen bij het doorspoelen: zeker bij de lucht en water kanalen.
- Zorg voor de registratie en documentatie per kweekpotje, vang minimaal 20mL op.

### VOORBEREIDING


Bereidt een schoon werkveld voor en werk aseptisch. Plaats de te kweken endoscoop in een transportbak en leg de volgende hulpmiddelen klaar:

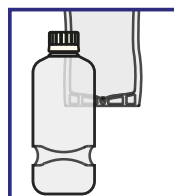


spoelvloeistof (fles of zak)



(steriele) handschoenen

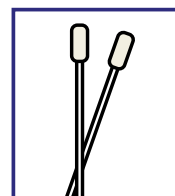

swabs

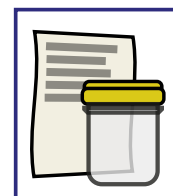

monsterafnamepotjes

### LUCHT DOORVOER

Draai het blauwe kraantje zoals hieronder om de spuit te vullen met lucht en vervolgens door het kanaal te drukken.

