

VALIDOSS SAMPLING KIT

VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN



SNEL EN BETROUWBAAR

Met de keuze voor aanvoer van spoelvloeistof via een fles of een zak, wordt de slangenset op aseptische wijze aangesloten. Dit gesloten systeem vermindert het risico op besmetting aanzienlijk.

Bij gebruik van een fles wordt de lucht gefilterd met een 0,2-micron filter in de dop, wat zorgt voor steriel water tijdens gebruik. Dankzij het gesloten systeem is slechts één spuit nodig voor alle kanalen.

De Validoss Sampling Kit voor flexibele endoscopen is individueel verpakt en gesteriliseerd om een consistente en betrouwbare bemonsteringskwaliteit te waarborgen.

MEER INFORMATIE

Benieuwd naar de mogelijkheden van het Validoss Sampling Kit? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

VALIDOSS B.V.
Minervum 7166B
4817 ZN Breda, NL

+31 (0)76 20 90 931
info@validoss.nl
www.validoss.nl

EIGENSCHAPPEN

- Steriel en individueel verpakt.
- Kweekafname door één persoon.
- 6 connector aansluitingen om alle kanalen individueel te kweken.
- Te gebruiken met de meeste flexibele endoscopen.
- Doorvoer met zowel spoelvloeistof als lucht zonder de spuit te ontkoppelen.
- Gesloten systeem om maximale veiligheid te garanderen.
- Eenvoudige en reproduceerbare werkwijze.
- Kweekafname bij een endoscoop in liggende of hangende positie.

OLYMPUS®
Art nr: 40118

FUJIFILM®
Art nr: 40117*


PENTAX®
Art nr: 40116*

per stuk verpakt - steriel - VE 10 stuks
* verwacht Q1 2024

BETROUWBAAR | BETROKKEN | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJK

VALIDOSS SAMPLING KIT

VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN

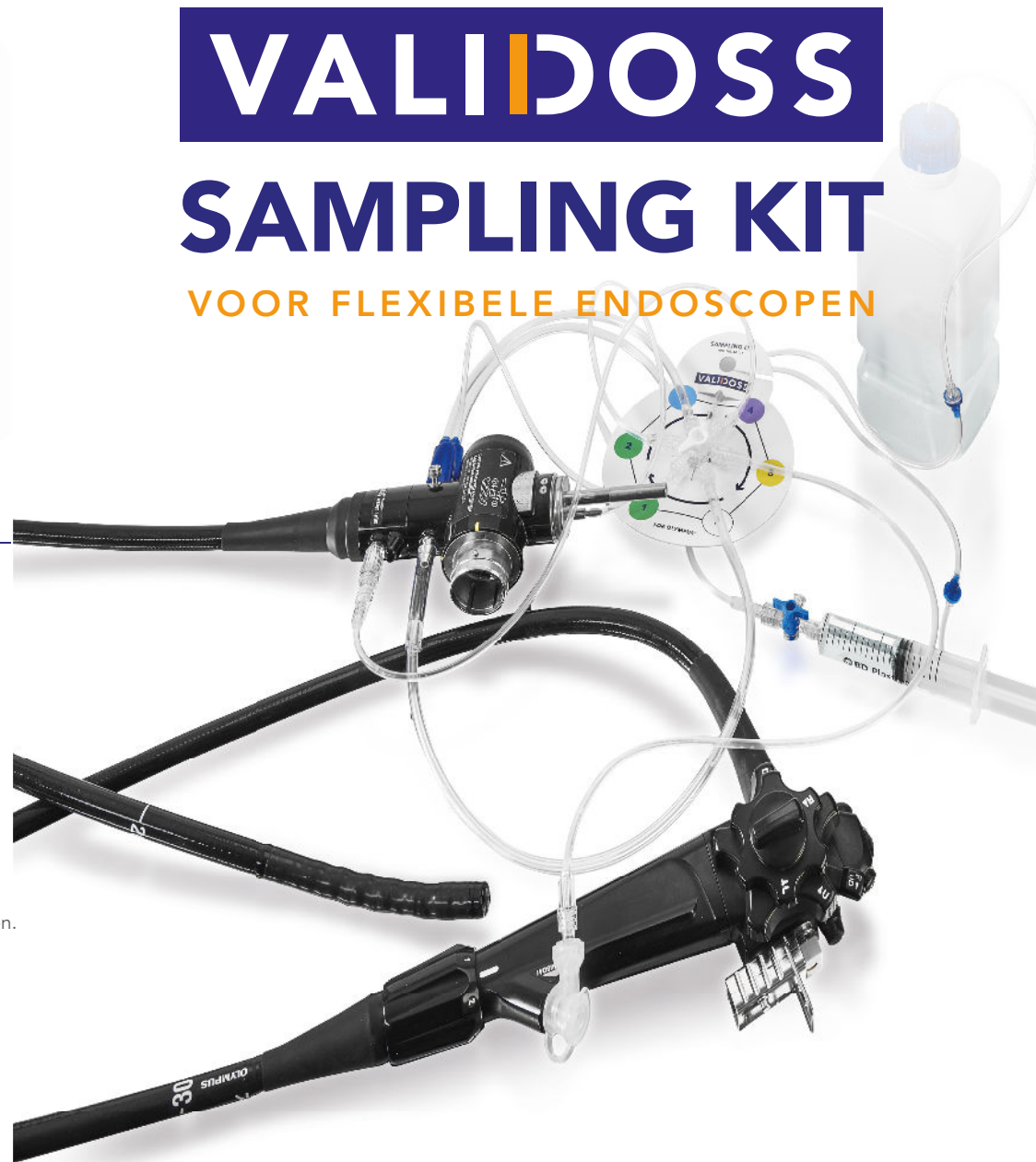


INFO@VALIDOSS.NL | WWW.VALIDOSS.NL

BENODIGDHEDEN


Naast de Validoss Sampling Kit zijn een aantal hulpmiddelen nodig. De uitgevallen verpakking van de Validoss Sampling Kit kan dienen als schoon werkvloeroppervlak.




Monsterpotjes

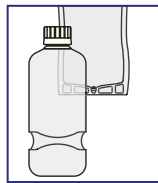


Spoelvoeistof (fles of zak)

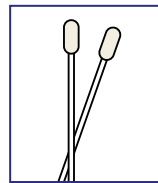

Swabs

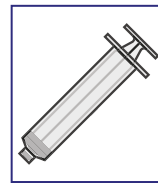

Spuit met Luer-Lock

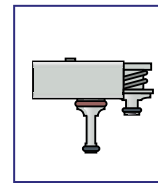

Kanaalscheider



Handschoenen

ÉÉN PERSOON

De Validoss Sampling Kit voor flexibele endoscopen helpt de gebruiker om het kweekafname proces overzichtelijker te maken en te versnellen. Doordat de koppelingen van te voren worden aangesloten kan de kweekafname door één persoon worden uitgevoerd.

Extra aandacht is gegeven om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Zo wordt de drempel lager om meer mensen op te leiden voor het uitvoeren van kweekafnames en verkleint de kans op vals positieven.




Monsterpotje

Validoss Sampling Kit

Spuit met Luer-Lock

Spoelvoeistof (fles of zak)

voorbeeld van art nr 40118
voor Olympus® endoscopen

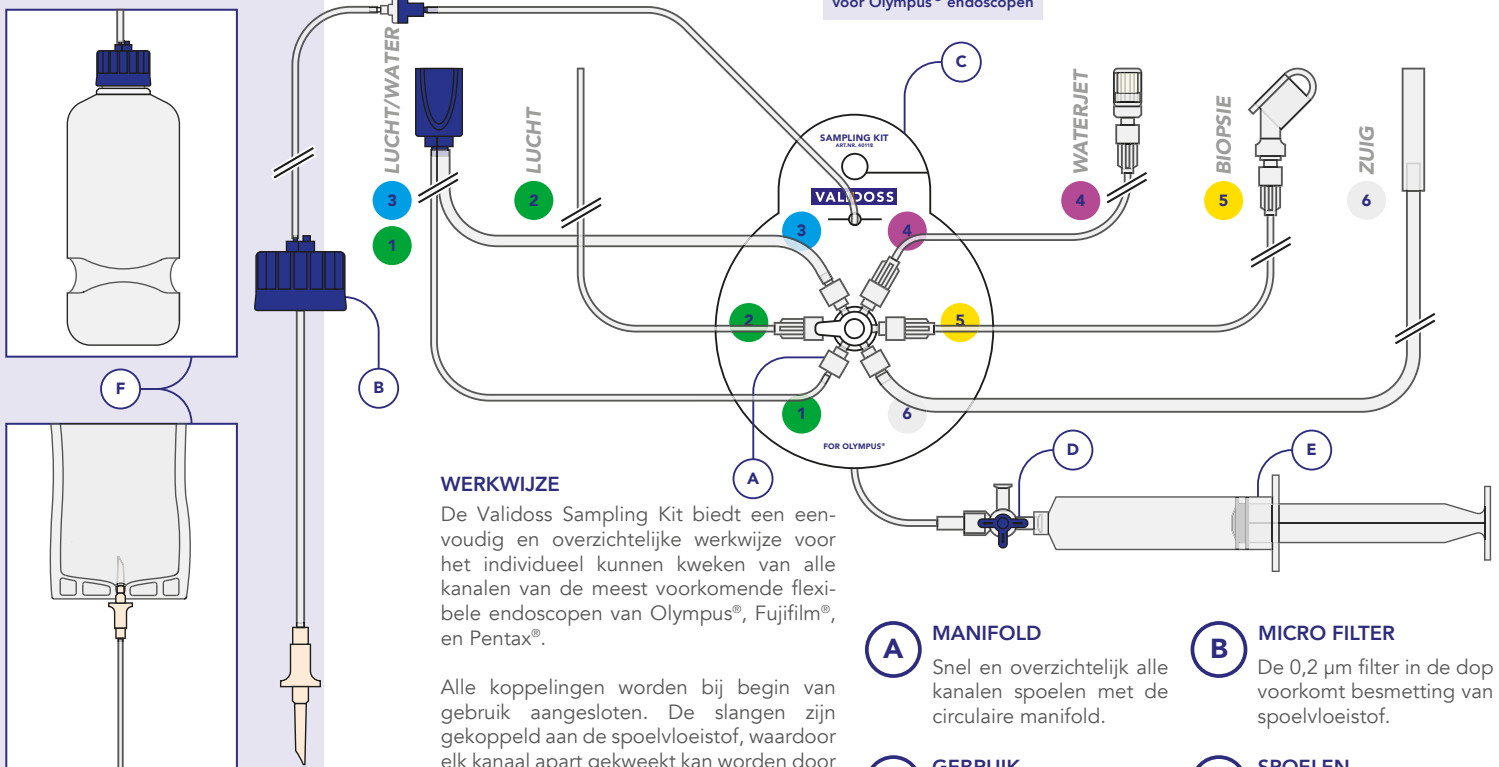

WERKWIJZE

De Validoss Sampling Kit biedt een eenvoudig en overzichtelijke werkwijze voor het individueel kunnen kweken van alle kanalen van de meest voorkomende flexibele endoscopen van Olympus®, Fujifilm®, en Pentax®.

Alle koppelingen worden bij begin van gebruik aangesloten. De slangen zijn gekoppeld aan de spoelvoeistof, waardoor elk kanaal apart gekweekt kan worden door de manifold te draaien van posities 1 t/m 6. Het volume van de spoelvoeistof voor kweekafname kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.

Kweken kan worden uitgevoerd met de endoscoop in zowel een horizontale als opgehangen positie.

- A MANIFOLD**
Snel en overzichtelijk alle kanalen spoelen met de circulaire manifold.
- B MICRO FILTER**
De 0,2 µm filter in de dop voorkomt besmetting van spoelvoeistof.
- C GEBRUIK**
Mogelijkheid voor kweekafname bij endoscoop in hangende positie.
- D SPOELLEN**
Spoelvoeistof of lucht zonder ontkoppelen van de spuit.
- E FLUSH**
Maar één spuit voor hele kweekafname.
- F SPOELVLOEISTOF**
Twee opties voor aansluiten van spoelvoeistof.

VALIDOSS
SAMPLING KIT
VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN